
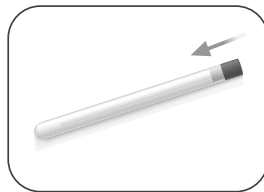


ISTRUZIONI PER ESEGUIRE IL TAMPONE BUCCALE

Raccolta DNA tramite tampone buccale

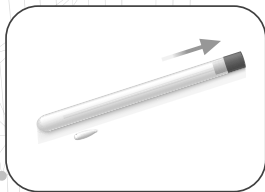

ATTENZIONE!

Per effettuare correttamente la procedura di raccolta non invasiva del DNA, mediante tampone buccale, è importante ricordare nei 60 minuti precedenti alla raccolta di:

- Non mangiare
- Non bere
- Non fumare
- Non masticare gomme
- Non lavare i denti

Può essere utile un breve risciacquo con acqua naturale a temperatura ambiente prima di procedere allo strofinamento con il tampone.

PROCEDURA DI RACCOLTA

Lavare ed asciugare accuratamente le mani, se possibile indossare un paio di guanti.

Non maneggiare campioni di altri soggetti per evitare contaminazioni.

Estrarre il tampone dal suo involucro afferrandolo dal tappo.

Il tampone è sigillato, occorre esercitare la forza necessaria per aprire il sigillo adesivo, quindi ruotarlo e sfilarlo dal tubo di plastica.

ATTENZIONE!

Non toccare la parte in cotone del tampone per evitare la contaminazione!

E' consigliabile strofinare il tampone su entrambe le guance, tra guancia e gengiva superiore destra e sinistra ed inferiore destra e sinistra per circa 1 minuto.

Terminata la raccolta, maneggiare il tampone accuratamente, evitare di toccare con le mani la parte in cotone del tampone contenente il campione da analizzare per evitare la contaminazione.

Inserire il bastoncino nel tubo di plastica, facendo attenzione a non toccare il campione.

Chiudere accuratamente il tubo di plastica.

Scrivere sull'etichetta dell'involucro contenente il tampone i propri dati (nome, cognome, data di nascita e sesso) e la data del prelievo.

Il DNA così raccolto si spedisce a temperatura ambiente.

IMPORTANTE:

- 1) Avvolgere il campione biologico raccolto nell'apposita provetta all'interno del foglietto, contenente il consenso al trattamento dei dati personali, debitamente compilato e consegnare il tutto al rivenditore o al corriere GLS;
- 2) Spedire il campione entro e non oltre le 36 ore dal prelievo.

COME PROGRAMMARE IL RITIRO

Programmare il ritiro della busta GLS è semplicissimo sarà sufficiente:

- 1) Consultare il sito www.gls-italy.com, trovare la sede più vicina e contattare il numero di telefono.
- 2) Preparare la spedizione inserendo nella busta GLS in dotazione, la Box "DNA REVOLUTION" contenete il campione biologico avvolto nel foglietto del consenso al trattamento dei dati personali.
- 3) Scrivere l'indirizzo del mittente e l'indirizzo del destinatario sia sulla busta che sull'apposito bollettino.

INDICARE sul bollettino di spedizione "porto assegnato - cod. cliente 3913"

APULIA GENETICS S.r.l.

Via Brindisi, snc - 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831 1970111 - Fax 0831 1970198
info@apuliagenetics.com - www.apuliagenetics.com

RISULTATI

Una volta che il campione biologico giunge al laboratorio di genetica "Apulia Genetics", il tempo di consegna del risultato avverrà entro 3 settimane circa dal ricevimento della busta, via e-mail all'indirizzo comunicato sul foglietto del consenso al trattamento dei dati personali.

APULIA GENETICS... MOLTO DI PIÙ

LA STRUMENTAZIONE AVANZATA DI CUI DISPONE IL LABORATORIO DI ANALISI E RICERCA GENETICA "APULIA GENETICS" GARANTISCE L'ESECUZIONE DI INDAGINI ROUTINARIE E GENETICO-MOLECOLARI PIÙ SPECIFICHE QUALI:

- ✓ Ereditarietà dei tumori: seno, ovaio, colon, prostata, stomaco e melanoma
- ✓ Ereditarietà all'ipercolesterolemia
- ✓ Biopsia liquida
- ✓ Analisi per terapia oncologica mirata e personalizzata
- ✓ Analisi prenatali su sangue materno
- ✓ Abortività ricorrente (trombofilia)
- ✓ Analisi per l'infertilità di coppia
- ✓ Analisi per patologie sessualmente trasmissibili
- ✓ Analisi per terapia personalizzata allo scopo di ridurre il colesterolo
- ✓ Analisi di paternità informative e legali
- ✓ Celiachia
- ✓ Intolleranze alimentari (lattosio, caffeina, alcool, sale, fruttosio, nichel e solfiti)
- ✓ Analisi della flora batterica intestinale (microbioma)
- ✓ Analisi sportive (performance sportive e danno muscolo-tendineo)
- ✓ Analisi predisposizione all'obesità e metabolismo di grassi e carboidrati

Per informazioni su analisi più specifiche o per prenotazioni potete contattare il nostro centralino al numero **0831 1970111** o visitare il sito **www.apuliadiagnostic.com**